

Правила ухода:

Ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



Условия хранения:

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не установлен. Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. BAN-101(M), инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции и правил эксплуатации бандажа.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Зарегистрировано в ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

РУ № ФСЗ 2011/09550 от 12.04.2011 г.

Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ24.Д00210 от 15.04.2011 г.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ

Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.

Арт. INTOK-BAN-101(M)-N5_02/12



Medical Line



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



Инструкция по применению ортопедических изделий



Бандаж на голеностопный сустав BAN-101(M)

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Бандаж Orlett на голеностопный сустав эластичный с ребрами жесткости стабилизирует голеностопный сустав, уменьшает ударные нагрузки за счет спиральных ребер жесткости, ограничивает боковые движения сустава, не влияя на сгибание и разгибание. Легкий компрессионный эффект бандажа способствуют сокращению сроков реабилитации.

Показания к применению:

- ушибы и растяжения связок голеностопного сустава;
- профилактика травм голеностопного сустава и обострений артритов, бурситов, тендовагинитов, синовитов;
- реабилитационный период лечения травм и заболеваний области голеностопного сустава.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач. Для профилактики травм рекомендованный режим: при нагрузках на голеностопный сустав (производственных или спортивных).

Противопоказания:

Противопоказаний для использования бандажа не выявлено.

Предупреждения:

- людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием бандажа необходимо проконсультироваться с врачом;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Инструкция по применению:

Конструкция бандажа:

Бандаж изготовлен из эластичной ткани с высоким содержанием хлопка и усилен четырьмя боковыми пружинными ребрами жесткости.

Порядок надевания:

Надеть бандаж на голеностопный сустав, как носок. Вырез должен располагаться в области пятки (см. рис. 1).



Рис. 1

Правила подбора:

Сантиметровой лентой плотно, не утягивая, измеряется обхват подъема стопы (см. рис. 2).

Согласно полученным результатам подобрать бандаж Orlett по таблице подбора размеров.

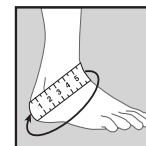


Рис. 2

Таблица подбора размеров:

Бандаж на голеностопный сустав, арт. BAN-101(M)					
Размер	S	M	L	XL	XXL
обхват подъема стопы (см)	26-29	29-32	32-35	35-38	38-41

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Состав изделия:

13% хлопок, 50% полиэстер, 37% эластик.