



**Современные решения
для гигиены и ухода**





Современная гигиеническая продукция для ухода при недержании позволяет многим людям сохранять высокое качество жизни.

Международная компания SCA разрабатывает и выпускает предметы личной гигиены, бумажную продукцию и изделия из древесины.

SCA – мировой лидер в категории продукции для ухода при недержании¹ представляет в России продукцию под торговым знаком ТЕНА.

Более 40 лет ТЕНА является Европейским стандартом качества индивидуального ухода

Далее Вы найдете полезную информацию о специальной продукции для ухода при недержании под торговым знаком ТЕНА, рекомендации по подбору и использованию изделий. Мы надеемся, что данная информация поможет Вам!



Уход за людьми с ограничением подвижности

Подгузники для взрослых

Подгузники для взрослых применяются для ухода за лежачими больными с недержанием средней и тяжелой степени.

Правильно подобранный подгузник надежно защищает от протеканий и может без замены прослужить до 8 часов. Рекомендуется использовать 3 подгузника в сутки.



Подгузники для взрослых ТЕНА Слип

Воздухопроницаемый мягкий материал позволяет коже дышать и уменьшает риск перегревания и раздражения кожи^{1,2}.



1. Об эффективности применения гигиенических средств марки ТЕНА при медико-социальной реабилитации больных рассеянным склерозом. СПбООИБРС, 2005 г. 2. Об изучении экономической эффективности применения одноразовых средств ухода за больными, страдающими инконтиненцией, марки «ТЕНА» в условиях стационара. Санкт-Петербургский Городской Гериатрический центр, 2004 г.

* ФилДрай

Узнайте больше о подгузниках для взрослых ТЕНА Слип и уходе за лежачими больными на уход-и-забота.рф.

Уход за подвижными людьми Подгузники-трусы для взрослых

Подгузники-трусы применяются для ухода за подвижными мужчинами и женщинами с недержанием средней степени, которые сохранили способность самостоятельно одеваться и иногда самостоятельно посещать туалет.

Подгузники-трусы надевают и носят как обычное белье. Рекомендуется использовать 1–2 изделия в сутки.

Подгузники-трусы не подходят для лежащих больных.



Подгузники-трусы ТЕНА Пантс

Технология Body-Close Fit¹ обеспечивает плотное прилегание, благодаря чему ТЕНА Пантс лучше защищают от протеканий и гораздо удобнее сидят.



Закажите бесплатный образец подгузников-трусов ТЕНА Пантс по телефону **8-800-200-23-32** или на сайте www.TENA.ru.

1. Боди-Клоуз Фит. 2. Одор Нейтрализер.

Личная гигиена

Специальные урологические прокладки для женщин

Как Вы думаете, почему даже самые веселые женщины иногда сдерживают смех? Каждая третья¹ жительница России от 25 до 70 лет периодически сталкивается с таким деликатным явлением, как легкое и капельное недержание мочи.

Еще лет 10-15 назад легкое и капельное недержание мочи доставляло женщинам массу неудобств. Сегодня же все больше женщин выбирают специальные (урологические) прокладки ТЕНА Леди, которые обеспечивают **тройную защиту**:

- мгновенное чувство сухости;
- повышенную впитывающую способность²;
- нейтрализацию запаха, благодаря системе Fresh Odour Control³.



Специальные урологические прокладки ТЕНА Леди

ТЕНА Леди используются при капельном и легком недержании, обеспечивая **тройную защиту**:

Нейтрализация запаха благодаря Системе Fresh Odour Control со специальными микрогранулами.

Сухость и комфорт.

Повышенная впитывающая способность².

А также женственный дизайн и удобная индивидуальная упаковка!



1. Данные исследования по недержанию мочи среди женщин, март 2009 г., ООО «Магнам Маркет Рискс». В исследовании, проведенном по заказу ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша», производителя прокладок под торговым знаком ТЕНА Леди, приняли участие 1711 женщин в 14 городах с населением 1 миллион человек и более. 2. По сравнению с гигиеническими прокладками. 3. Фреш Одор Контрол.

Узнайте больше о специальных урологических прокладках ТЕНА Леди на сайте [www.TENA.ru/для женщин](http://www.TENA.ru/для_женщин).

Личная гигиена

Специальные урологические прокладки для женщин

Широкий ассортимент специальных прокладок ТЕНА Леди представлен ультра-тонкими, тонкими, а также супер-впитывающими прокладками.

В среднем рекомендуется использовать 1–2 урологических прокладки в сутки. При большем расходе, удобнее начать использование прокладки большего размера с повышенной впитывающей способностью.

Прокладки ТЕНА Леди Экстра Плюс созданы специально для ситуаций, когда высокая впитываемость имеет значение.

Новая технология InstaDRY™¹ обеспечивает этим прокладкам **самое быстрое впитывание** в ассортименте урологических прокладок ТЕНА.



Представляем новые прокладки ТЕНА Леди Экстра Плюс с технологией InstaDRY™¹

Новая зона InstaDRY™¹

мгновенно поглощает даже большое количество влаги⁴. Специальное углубление предотвращает контакт кожи с жидкостью, сохраняя свежесть и сухость кожи.

Эластичные барьеры для еще более надежной защиты.

Новая форма прокладки обеспечит комфорт и надежность при небольшом размере.

Нейтрализация запаха благодаря системе Fresh Odour Control².



1. ИнстаДрай Зона. 2. Фреш Одор Контрол. 3. По результатам сравнительного исследования применения прокладок ТЕНА Леди в послеродовом периоде, НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург, август 2013; 4. Впитывающая способность по методу ISO 11948-1 580 мл.

Специальные урологические прокладки ТЕНА Леди Экстра Плюс одобрены для использования в послеродовом периоде³.

Личная гигиена Специальные средства защиты для мужчин

С возрастом многие мужчины сталкиваются с капельным и легким недержанием. Наиболее часто встречающаяся причина – заболевания предстательной железы.

Решением для мужчин, оказавшихся в данной ситуации, являются специальные средства защиты для мужчин.

Средства защиты изготавливаются из впитывающего материала с гранулами суперабсорбента. Они быстро впитывают влагу и неприятный запах, возвращая ощущение сухости и комфорта.



Специальные средства защиты ТЕНА Мен

Технология MAXX Protection Technology™¹ для максимальной защиты от протеканий.

Сухость
и комфорт.



Система нейтрализации запаха Odour Control² позволяет уверенно чувствовать себя в разных ситуациях.

Разработаны специально для мужчин. Оптимальный размер, подходят большинству мужчин.



Узнайте больше о специальных средствах защиты для мужчин ТЕНА Мен на сайте [www.TENA.ru/для мужчин](http://www.TENA.ru/для_мужчин).

Сопутствующие товары Профессиональный уход за кожей

При каждой замене подгузников необходимо осуществлять гигиену и уход за кожей человека.

Для данных целей рекомендуется использование профессиональных средств по уходу за кожей.



Профессиональные косметические средства ТЕНА

Очищение



Моющая пена / Моющий крем.

Заменяют мытье водой и мылом и не требуют последующего смывания. Не содержат спирта и мыла.



Влажные полотенца.

Предназначены для бережного и быстрого очищения кожи при невозможности принять ванну.

Защита



Успокаивающий крем с цинком.

Предназначен для заживления опрелостей и трещин, уменьшения раздражения кожи. Не содержит отдушек и консервантов.



Защитный крем-барьер.

Образует на коже водоотталкивающую пленку для дополнительной защиты от внешних раздражителей (пот, моча / кал, трение).

Как правильно подобрать продукцию ТЕНА


Степень подвижности:

Степень недержания:

Подвижные
пациенты



Лежачие
пациенты

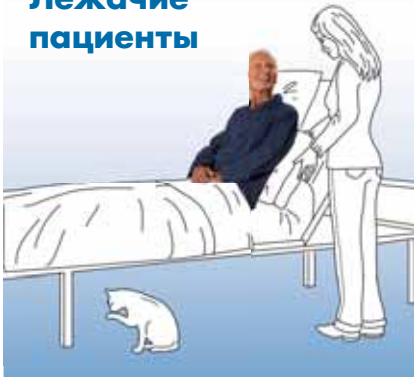

Легкая степень



Урологические
прокладки для
женщин ТЕНА Леди

Средства защиты
для мужчин
ТЕНА Мен



Урологические
прокладки для
женщин ТЕНА Леди

Средства защиты
для мужчин
ТЕНА Мен



Задайте два простых вопроса:

1. Подбирается ли продукт для **подвижного** или **лежачего** пациента?
2. Какова степень тяжести недержания (легкая, средняя, тяжелая)?

Средняя степень



Подгузники-трусы
ТЕНА Пантс Нормал



Подгузники для взрослых
ТЕНА Слип Плюс



Тяжелая степень



Подгузники-трусы
ТЕНА Пантс Плюс



Подгузники для взрослых
ТЕНА Слип Супер



Информация на упаковках продукции ТЕНА

На всех упаковках продукции ТЕНА Вы можете найти всю необходимую информацию о изделиях и изготовителе. Данная информация поможет Вам легко сориентироваться в ассортименте.



Степень впитываемости продукции обозначается цветовым кодом и количеством капель на упаковке.




Изделия имеют **размерный ряд**: Small (маленький), Medium (средний), Large (большой). Размер обозначен внизу на лицевой стороне упаковки.


Количество штук в упаковке обозначено внизу на лицевой стороне упаковки.



Информация о изготовителе и импортере размещена на боковой стороне упаковки.

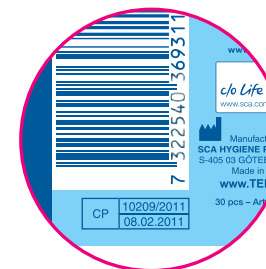


Дата производства размещена на боковой стороне упаковки.

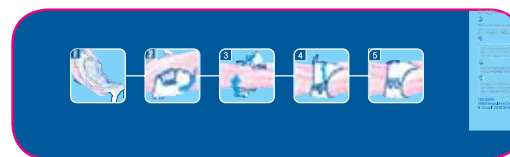

На упаковке размещена иллюстрация, как правильно использовать изделие.



Графические значки на упаковках информируют о главных свойствах и преимуществах продукции ТЕНА.

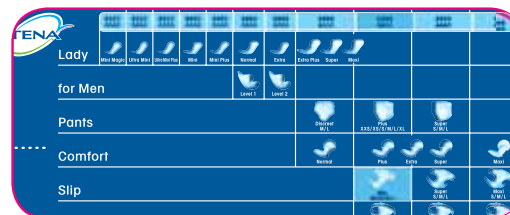

Информация о **полном ассортименте ТЕНА** указана в специальной таблице.



Информация о продукции ТЕНА на сайте www.TENA.ru
и по телефону горячей линии ТЕНА: 8-800-200-2332
(все звонки по России бесплатные)

Изготовлено: ООО НПЦ «Мединформ» для ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша».
Тираж 6 000 шт.

